

Pflegemittel

appenzeller
kontaktlinsen®
passt.

Komfort und Sicherheit

Einsetzen und herausnehmen,
pflegen und aufbewahren



Wellness ***** für
meine Kontaktlinsen.

info@appenzeller-kontaktlinsen.ch
www.appenzeller-kontaktlinsen.ch



Kleine Kunststoffschalen...

passt.

Herr Feinbloom war's. Der Optiker verwendete als erster PMMA für die Linsenherstellung. Das war in den 1930-er Jahren. Seither hat sich für Millionen von Menschen dank der kleinen Kunststoffschalen ein grosses Fenster zur Welt aufgetan.

Auch wir betreiben sehr grossen Aufwand für die Forschung und Entwicklung. Damit unsere Kontaktlinsen stets den neusten Möglichkeiten der Technik entsprechen.

Unser Professional Service berät Sie kompetent, persönlich und geduldig. Für Antworten auf jede Frage – und damit Sie in jedem Fall die richtige Kontaktlinse erhalten.

i-SOFT



3-Monatslinsen

Mein Jahresvorrat an weichen Linsen. Pro Auge.

Personnelle



Einstärken – Multifokal – Digitaler Lifestyle

Meine Linse. So einzigartig wie mein Fingerabdruck.

Excellent AS Excellent MK



Einstärken – Multifokal – Bifokal

Klassisch, praktisch, excellent: Auf diese Linse ist Verlass.

i-MAP AS



Einstärken – Multifokal – Bifokal

High-Tech für meinen Alltag: Jeder Situation gewachsen.

Gut für Ihre Kunden, gut für Sie, gut auf lange Sicht

Kontaktlinsen nach Mass sind keine Eintags-
fliegen, sondern ein fortlaufender Prozess –
und ein fortlaufendes Geschäft

Liebe Leserin, lieber Leser

Kontaktlinsen sind nicht einfach ein Produkt. Kontaktlinsen sind ein Prozess, der mit Ihrer Beratung beginnt. Und mit der erfolgreichen Anpassung noch lange nicht abgeschlossen ist.

Weil Kontaktlinsen eingesetzt und herausgenommen werden wollen. Und weil sie gereinigt und aufbewahrt werden müssen. Aus diesem Grund liefern wir Ihnen nicht nur Kontaktlinsen nach Mass. Sondern auch Know-how nach Mass. Dazu gehört unser Professional Service, der mit Rat und Tat für Sie da ist. Und dazu gehören Pflegeprodukte und Zubehörartikel, die Ihren Kundinnen und Kunden ein grösstmögliches Mass an Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit schenken.

Gute Kontaktlinsen haben einen Namen. Gute Pflegeprodukte und gutes Zubehör ebenso: Appenzeller Kontaktlinsen.

Wir haben dasselbe Ziel wie Sie: Ihre Kundinnen und Kunden sollen nach der Anpassung mit Ihrer Beratung und Ihren Kontaktlinsen 100% zufrieden sein. Und zwar auf lange Sicht. Deshalb garantieren wir Ihnen mit unserem Namen, dass unsere Pflegemittel und unser Zubehör höchste Qualitätsansprüche erfüllen und Ihr Vertrauen verdienen.

Mehr als hier erfahren Sie ganz persönlich.

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick. Und wir zeigen Ihnen auch, dass Sie die Pflegeprodukte ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen kombinieren und Ihren Kundinnen und Kunden als Sets anbieten können: Gesamtlösungen mit allen Produkten, die man von Fall zu Fall benötigt.

Wenn Sie mehr wissen möchten: Setzen Sie sich mit unserem Professional Service in Verbindung. Und wenn Sie Beratung bei sich vor Ort wünschen: Rufen Sie uns ebenfalls an oder schreiben Sie uns.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören oder zu lesen.



M'hamed Bouhlal, CEO
Appenzeller Kontaktlinsen AG



passt.

Inhaltsverzeichnis

→ Weiche Kontaktlinsen Seite

Täglich	Vorgang	Produkt	Produktalternative	
Schritt 1	reinigen	Reiniger		5
Schritt 2	abspülen	Saline		5
Schritt 3	desinfizieren und aufbewahren	Peroxid	All-in-One soft	6 / 8
1x wöchentlich zusätzlich				
Schritt 4	Proteinentfernung	Enzyme		7

→ Harte Kontaktlinsen Seite

Täglich	Vorgang	Produkt	Produktalternative	
Schritt 1	reinigen	Reiniger		5
Schritt 2	abspülen	Saline		5
Schritt 3	desinfizieren und aufbewahren	Peroxid	All-in-One RGP	6 / 9
1x wöchentlich zusätzlich				
Schritt 4	Proteinentfernung	Enzyme		7

→ Zubehör Seite

Produkt	Spezifizierung	
Aufbewahrungsbehälter	Für Peroxid, für grosse weiche Linsen (inkl. Sklerallinsen)	12
Linsen-Case		12
Pinzette blau		12
Einsetzhilfe	Für Sklerallinsen und Minisklerallinsen	13
Sauger	Mit Loch	13
	Ohne Loch	13
i-Case	Auf Wunsch mit Ihrem Logo	14

1. REINIGEN

Weiche und harte Linsen

Reiniger auf Alkoholbasis für die tägliche Pflege von formstabilen (auch GP-plasmabeschichtet) sowie weichen Kontaktlinsen.

2. ABSPÜLEN

Weiche und harte Linsen

Die Kochsalzlösung zum Abspülen von weichen und formstabilen Kontaktlinsen nach der Reinigung der Linsen. Ebenfalls zum Einsetzen der Kontaktlinsen geeignet – ausser für Sklerallinsen.



passt.





passt.

3. DESINFIZIEREN/AUFBEWAHREN

Weiche und harte Linsen

→ 1 Stunde – fertig

Die Desinfizierung und Neutralisierung der Linsen lässt sich ganz schnell bewerkstelligen. Und ganz einfach. Und 100% perfekt. Appenzeller Kontaktlinsen macht es möglich: mit diesem Peroxidsystem. Für herkömmliche weiche Linsen, Austauschlinsen und harte und gasdurchlässige Linsen (RGP-Linsen).

1 Packung = 1 Monatsbedarf

Eine Packung enthält 360 ml Desinfektionsflüssigkeit und 36 Tabletten für die Neutralisation.

2 oder 3 Packungen gibt es auch als Set.

Oder als Kombination mit anderen Pflegemitteln. Ein Monat ist schnell vorbei. Deshalb bieten wir Ihnen unser Peroxidsystem als Set von 2 oder 3 Packungen an – umhüllt von einer dünnen Klarsichtfolie, die sich ohne Schere oder anderes Werkzeug entfernen lässt.

Ihr Set 100% nach Ihren Vorstellungen

Das Set können Sie aber auch ganz anders konfigurieren – ganz nach Ihren Wünschen. Siehe Seite 10/11.

→ Die richtige Aufbewahrung

Grosse Körbchen für grosse weiche Linsen – bis hin zu Sklerallinsen. Wie gemacht für Peroxidsysteme ohne Katalysator.

→ Unser Tipp: einfach ausprobieren!

Das Starterset: gemacht, um Ihren Kundinnen und Kunden das Peroxidsystem näherzubringen. Indem sie es testen und nochmals testen – und danach restlos überzeugt sind



4. PROTEINENTFERNUNG



passt.

1x wöchentlich: Weiche und harte Linsen

→ Intensivreinigung

Tag für Tag lagern sich Proteine auf den Linsen ab. Zusätzlich zur täglichen Neutralisation der Linsen ist wöchentlich eine Proteinreinigung nötig. Wenn das Peroxidsystem verwendet wird.





passt.

3. DESINFIZIEREN/AUFBEWAHREN

Die Variante für weiche Linsen

→ Die Vorteile
von All-in-One soft

Längere Wirkungsweise, längere Tragedauer, längeres Komfortgefühl

Für alle, die sich nicht für das Peroxidsystem und Desinfektion und Neutralisation in ungewöhnlich kurzer Zeit entscheiden: in nur einer Stunde. Siehe Seite 6.

Die Kombilösung mit Natriumhyaluronat sehen Sie hier.

- Linsen-Case für den Anpassraum → Seite 12.
- i-Case mit Ihrem Logo → Seite 14.

→ Unser Tipp:
einfach ausprobieren!

Das Starterset: gemacht, um Ihren Kundinnen und Kunden All-in-One soft näherzubringen. Indem sie es testen und nochmals testen – und danach restlos überzeugt sind.

1 Starterset enthält 60 ml Kombilösung.





passt.

Die Variante für harte Linsen

→ Die Vorteile von All-in-One RGP

All-in-One RGP ist schlicht und einfach ein Desinfektionsmittel

Für alle, die sich nicht für das Peroxidsystem und seine ungewöhnlich rasche Wirkung entscheiden, nämlich Desinfektion und Neutralisation in nur einer Stunde. Siehe Seite 6.

Die Kombilösung für sauerstoffdurchlässige, harte Linsen (RGP) sehen Sie hier.

i-Case mit Ihrem Logo → Seite 14.





passt.

So oder so:

Entweder einzelne Produkte...

Appenzeller Kontaktlinsen bietet Ihnen nicht nur praktisch alle Linsentypen an. Sondern auch alles, damit Ihre Kundinnen und Kunden an ihren Kontaktlinsen möglichst viel Freude haben – möglichst lange viel Freude.

→ Kundenbindung und Treue, Sicherheit und Komfort

Ebenso Freude haben dürfen auch Sie: Denn Kundinnen und Kunden, die einmal Pflegemittel von Ihnen beziehen, kommen immer wieder zu Ihnen.

Und: Kundinnen und Kunden, die sowohl Appenzeller Kontaktlinsen tragen als auch Pflegemittel und Zubehör von Appenzeller Kontaktlinsen benutzen, sind die besseren Kundinnen und Kunden. Für Sie und für uns.

- Weil ihre Bindung grösser ist.
- Weil ihr Gefühl von Sicherheit und Komfort grösser ist.
- Weil ihre Treue grösser ist.

→ Wie möchten Sie die Kombination für Ihre Kunden?

Reinigen und abspülen, desinfizieren und aufbewahren: Das ist die Abfolge. Und entsprechend bieten wir Ihnen exakt aufeinander abgestimmte Produkte exakt in der von Ihnen gewünschten Kombination an. Schön als Set – umhüllt von einer dünnen Klarsichtfolie, die sich ohne Schere oder anderes Werkzeug entfernen lässt.

→ Kombinationsbeispiele

- 1x Reiniger plus 1x Saline plus 1x Peroxid plus 1x Enzyme
- 1x Reiniger plus 1x Saline plus 1x All-in-One soft
- 1x Reiniger plus 1x Saline plus 1x All-in-One RGP

Wie gesagt: Auch jede andere Kombination ist möglich. Ganz wie Sie wünschen.

→ Unser Aussendienst: offene Ohren für Ihre Fragen und Wünsche

Welche Kombination ist für Sie und Ihre Kundinnen und Kunden empfehlenswert?

- Mit welchen Preisen können Sie rechnen, wenn Sie eine bestimmte Menge bestellen?
- Wie sehen die Konditionen für Lieferung und Bezahlung aus?

Auf diese und alle weiteren Fragen gibt es nur eine Antwort: Reden Sie mit uns und unserem Aussendienst.



passt.

...oder als Set – konfiguriert nach Ihren Wünschen

→ Alle Produkte erhalten Sie als 2-er-Set oder 3-er-Set:

Appenzeller Kontaktlinsen Peroxid



Appenzeller Kontaktlinsen All-in-One RGP



Appenzeller Kontaktlinsen All-in-One soft



→ Oder auch als 2-er-Set oder 3-er-Set mit unserem Reiniger:

Appenzeller Kontaktlinsen Reiniger + Peroxid



Appenzeller Kontaktlinsen Reiniger + All-in-One RGP



Appenzeller Kontaktlinsen Reiniger + All-in-One soft



→ ...um nur einige von vielen Kombinationsmöglichkeiten zu nennen.



passt.

AUFBEWAHREN

Für Sklerallinsen

Für alle Arten von Linsen

→ Wie gemacht für Peroxid-systeme ohne Katalysator

Grosse Körbchen für grosse weiche Linsen – bis hin zu Sklerallinsen. Zum Beispiel das Appenzeller Kontaktlinsen Peroxyd.



→ Die blaue Pinzette

Mit transparenter Spitze aus Silikon. Mit Box zum Aufbewahren – praktisch und hygienisch.



→ Das Linsen-Case

Ideal für den Anpassraum. Transparent, robust, hygienisch. Auch für grosse Linsen sehr geeignet.



EINSETZEN UND ENTFERNEN



passt.

Für (Mini-)Sklerallinsen

Für formstabile Linsen

→ «Moritz»: zum Einsetzen von Skleral- und Minisklerallinsen

→ Zum Einsetzen und Entfernen von formstabilen Linsen

Mit Beleuchtung als Fixationshilfe.

Der klassische Sauger mit Loch.



→ «Max»: zum Einsetzen von Sklerallinsen

→ Zum Entfernen von formstabilen Linsen

Einsetzen einfach gemacht:

- Sklerallinse in die Wölbung der Einsetzhilfe legen
- Einsetzhilfe wie einen Ring auf die Fingerkuppe setzen
- Einsetzen von unten nach oben

Der klassische Sauger ohne Loch.





passt.

AUFBEWAHRUNG i-CASE

Nach Art Ihres Hauses

→ Ihre Kundinnen und Kunden
denken jeden Tag an Sie

Wenn sie jeden Tag Ihr Logo sehen. Deshalb bringen wir Ihr Logo auf dem Behälter für die linke Linse an – kostenlos. Vorausgesetzt, dass Sie mindestens 300 Stück bestellen.

1. Sie haben die Wahl aus fünf Farben:

- gelbRAL 1018
- orange RAL 2009
- rotRAL 3020
- grünRAL 6024
- blau RAL 5005

2. Sie haben die Wahl aus drei Designvarianten – Aufdruck auf dem linken Behältnis:

- Ihr Logo..... 300 Ex. Mindestbestellmenge
- unser Logokeine Mindestbestellmenge
- kein Aufdruckkeine Mindestbestellmenge



...grosses Fenster zur Welt.

appenzeller
kontaktlinsen®
passt.

i-NIGHT



Orthokeratologie auf höchstem Niveau
Nachts tragen – tagsüber sehen:
Ohne Brille, ohne Linsen.

Personnelle-KK
Excellent-KK



Keratokonus Kontaktlinsen
Hoher Konusgrad, hoher Anspruch:
passgenau wie angegossen.

i-MAP



Anpassung bei irregulärer Kornea
Passt auch dann, wenn keine andere
mehr passt.

i-MATRIX



Sklerallinsen
Verletzte Hornhaut, Keratokonus oder
Keratoplastik? Passt trotzdem.

*pro*ASSIST



Professionelle Unterstützung
bei progressiver Myopie
Intelligente Linsen statt dicke Gläser.



passt.

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Hauptstrasse 22
CH-9042 Speicher AR
Telefon +41 71 344 20 00

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Kemptener Strasse 8
D-88131 Lindau
Telefon +49 69 332 962 31

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Postfach 29
A-6973 Höchst
Telefon +43 72 088 16 97

info@appenzeller-kontaktlinsen.ch www.appenzeller-kontaktlinsen.ch

10 Punkte

Was für Appenzeller Kontaktlinsen spricht.

→ Anpassungserfolg

Wir unternehmen alles, um Ihre Wünsche und Vorstellungen zu verstehen. Damit Ihre Anpassung ein voller Erfolg wird – für Sie und Ihre Kunden.

→ Technikvorsprung

Wir betreiben sehr grossen Aufwand für die Forschung und Entwicklung. Damit unsere Kontaktlinsen stets den neusten Möglichkeiten der Technik entsprechen.

→ Swiss made

Wir stellen höchste Ansprüche an die Fertigungsqualität unserer Linsen. Damit unsere Kontaktlinsen Ihren ebenso hohen Erwartungen an Swiss made entsprechen.

→ Reproduzierbarkeit

Wir haben die permanente Fortsetzung Ihrer Kundenbeziehungen im Auge. Damit Sie bei jeder Nachbestellung exakt dieselbe Linse wie zuvor geliefert bekommen.

→ Offene Ohren

Unser Professional Service berät Sie kompetent, persönlich und geduldig. Für Antworten auf jede Frage – und damit Sie in jedem Fall die richtige Kontaktlinse erhalten.

→ Massarbeit

Wir stellen jede Kontaktlinse individuell auf Bestellung für Sie her. Damit sie 100% Ihren Vorgaben entspricht.

→ Tauschrecht

Wir liefern Ihnen unsere Kontaktlinsen wahlweise mit oder ohne Tauschrecht. Damit Sie die für Ihre Bedürfnisse optimale Wahl treffen können. Die Option «mit Tauschrecht» gibt Ihnen finanzielle Sicherheit: Sie können nachträglich eine andere Linse bestellen. Tun Sie dies innerhalb der Tauschfrist, bezahlen Sie nur einen Selbstbehalt. Massgebend für die Frist ist das Datum auf dem Lieferschein.

- Weiche Kontaktlinsen
 - *i*-SOFT 3 Monatslinsen: 1 Monat
 - Halbjahreslinsen: 2 Monate
 - Jahreslinsen: 3 Monate
- Formstabile Kontaktlinsen: 3 Monate

→ Preisvorteil

Wir bieten Ihnen speziell günstige Zahlungskonditionen an. Damit Sie in Form von Vorauszahlungen zusätzlich auf die Rechnung kommen. Die aktuellen Konditionen teilen wir Ihnen auf Wunsch gerne mit.

→ Garantieuumfang

Wir stehen für unsere Arbeit gerade. Damit Sie sich mit Garantie auf uns und unsere Kontaktlinsen verlassen können. Garantiedauer:

- *i*-SOFT 3 Monatslinsen: 1 Monat
- Halbjahreslinsen: 2 Monate
- Jahreslinsen: 3 Monate
- Bruch einer Linse: Senden Sie uns die defekte Linse innerhalb der Garantiedauer – und wir ersetzen sie. Auf Ihrer nächsten Rechnung nehmen wir eine entsprechende Gutschrift vor. Massgebend für die Garantiezeit ist das Datum auf dem Lieferschein.

→ Langfristige Optik

Wir streben dauerhafte Geschäftsbeziehungen mit Ihnen an. Damit auch Sie umgekehrt auf lange Sicht auf uns zählen können.

