

Produits d'entretien

appenzeller
kontaktlinsen®
passt.

Confort et sécurité

Pose et retrait, entretien et conservation



Le bien-être pour mes
lentilles ce contact.

info@appenzeller-kontaktlinsen.ch
www.appenzeller-kontaktlinsen.ch



Petites coques de plastique...

passt.

Mr. Feinbloom l'a fait. Cet opticien a été le premier à utiliser le PMMA pour produire des lentilles. C'était dans les années 30. Depuis, pour des millions de personnes, une grande fenêtre s'est ouverte sur le monde grâce à ces simples petites coques de plastique.

La R&D est notre principal investissement pour que nos produits bénéficient des toutes dernières avancées technologiques.

Notre Service Professionnel vous fournira une assistance compétente, afin de recevoir une réponse personnalisée à chacune de vos questions, et la lentille adéquate.

i-SOFT



Lentille souple trimestrielle
Ma réserve annuelle de lentilles souples.
Par œil.

Personnelle



Unifocale - Multifocale - Style de vie numérique
Mes lentilles sont comme mon empreinte digitale : Unique.

Excellent AS Excellent MK



Unifocale - Multifocale - Bifocale
Classique, pratique et excellente :
vous pouvez compter sur cette lentille

i-MAP AS



Unifocal - Multifocal - Bifocal
La haute technologie des lentilles au service de
ma vie quotidienne : prêt pour toute situation.

Bon pour vos clients, bien pour vous, bénéfique à long terme

Les lentilles de contact sur mesure ne sont pas un feu de paille, mais un processus continu et une affaire en cours

Chère lectrice, cher lecteur,

Des lentilles de contact ne sont pas seulement un produit mais un processus débutant avec votre conseil. Une fois l'adaptation elle-même terminée avec succès, la pose et le retrait ainsi que l'entretien des lentilles continuent.

C'est pourquoi nous ne vous livrons pas uniquement des lentilles de contact sur mesure mais aussi du savoir-faire sur mesure. Cela inclut notre Service Professionnel se tenant à votre disposition pour tout conseil. Il s'agit également des produits d'entretien et des accessoires offrant à vos clients bien-être, santé et sécurité absolue.

Les bonnes lentilles ont un nom. Les bons produits d'entretien et les bons accessoires également : Appenzeller Kontaktlinsen.

Nous avons un objectif en commun : après l'adaptation et votre conseil, vos clients doivent être satisfaits à 100% avec vos lentilles. Et ceci à long terme. C'est pourquoi nous vous garantissons que les produits d'entretien et les accessoires vendus sous le nom d'Appenzeller Kontaktlinsen répondent aux exigences de qualité les plus élevées et méritent votre confiance.

Notre gamme de produits et leurs combinaisons possibles

Pages suivantes, nous vous présentons notre gamme. Vous pouvez réaliser les combinaisons de produits les plus adaptées aux besoins de vos clients.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre Service Professionnel. Souhaitez-vous du conseil sur place ? appelez-nous ou écrivez-nous.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'avoir de vos nouvelles.



M'hamed Bouhlal, CEO
Appenzeller Kontaktlinsen AG



passt.

Contenu

→ Lentilles souples Page

Quotidien	Processus	Produit Option A	Produit Option B	
Etape 1	Nettoyer	Nettoyant	Nettoyant	5
Etape 2	Rincer	Saline	Saline	5
Etape 3	Désinfecter et conserver	Peroxyde	All-in-One soft	6 / 8
+ 1x par semaine				
Etape 4	Déprotéinisation	Enzyme		7

→ Lentilles rigides Page

Quotidien	Processus	Produit Option A	Produit Option B	
Etape 1	Nettoyer	Nettoyant	Nettoyant	5
Etape 2	Rincer	Saline	Saline	5
Etape 3	Désinfecter et conserver	Peroxyde	All-in-One RGP	6 / 9
+ 1x par semaine				
Etape 4	Déprotéinisation	Enzyme		7

→ Accessoires Page

Produit	Spécification	
Etui à lentilles peroxyde	Pour peroxyde, pour grandes lentilles souples (lentilles sclérales)	12
Boîtier à lentilles		12
Pincette avec boîte, bleue		12
Aide à poser	Pour lentilles sclérales	13
	Pour lentilles sclérales et lentilles mini-sclérales	13
Ventouses	A trou	13
	Sans trou	13
i-Case	Etui à lentilles, sur demande avec votre logo	14

1. NETTOYER

Lentilles souples et rigides

Nettoyant à base d'alcool pour l'entretien quotidien des lentilles rigides perméables aux gaz et des lentilles souples.

2. RINCER

Lentilles souples et rigides

La solution saline de rinçage pour toutes les lentilles de contact, souples et rigides. A utiliser pour rincer après le nettoyage des lentilles et également pour poser la lentille sur l'œil – sauf lentilles sclérales.



passt.





passt.

3. DÉSINFECTION/CONSERVATION

Lentilles souples et rigides

→ en 1 heure

Les produits Appenzeller Kontaktlinsen au peroxyde vous assurent une désinfection et une neutralisation faciles, rapides, et à 100 % efficaces.

Pour toutes les lentilles souples traditionnelles, lentilles de remplacement fréquent ou les lentilles rigides perméables aux gaz.

1 lot complet = 1 mois d'utilisation

Un emballage contient 360 ml de solution de désinfection et 36 comprimés pour la neutralisation.

Disponible aussi en lots de 2 ou 3 kits

Vous pouvez combiner plusieurs produits d'entretien. Comme un mois passe vite, nous vous proposons notre système peroxyde par groupe de 2 ou 3 lots, dans un film transparent facile à déballer.

Composez votre lot de produit à 100% selon vos besoins → Page 10 – 11

→ Le stockage adéquat

Des grandes corbeilles aussi bien pour les grandes lentilles souples que les lentilles sclérales. Pour des systèmes peroxydes sans catalyseur.

→ Notre conseil : le kit de départ

Vous convaincrez vos clients en leur permettant de tester quotidiennement les qualités du système peroxyde.



4. DÉPROTÉINISATION


1x par semaine : Lentilles souples et rigides



passt.

→ Nettoyage intensif

Des protéines se déposent tous les jours sur les lentilles. En plus de la désinfection et de la neutralisation quotidiennes des lentilles, une déprotéinisation hebdomadaire est nécessaire lors de l'utilisation du système peroxyde.

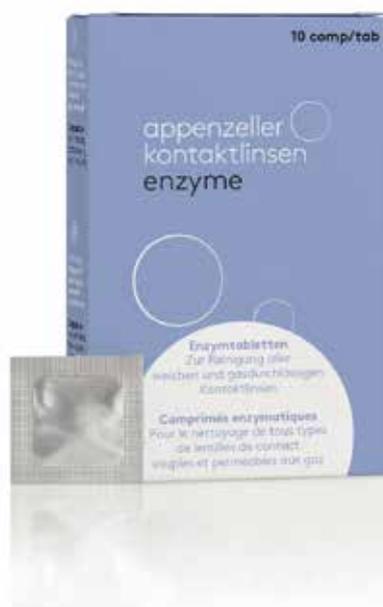



passt.

3. DÉSINFECTION/CONSERVATION

L'option pour lentilles souples

→ Les avantages
d'All-in-One soft

Une hydratation maximale, une durée de port et un confort prolongé.

Pour tous ceux qui n'optent pas pour le système peroxyde et son effet exceptionnellement rapide, désinfection et neutralisation en 1 heure (voir page 6).

Vous voyez ici la solution multifonction au hyaluronate de sodium.

- Le boîtier à lentilles pour votre salle d'adaptation → Page 12.
- L'étui i-case avec votre logo → Page 14.

→ Notre conseil :
le kit de départ

Vous convaincrez vos clients en leur permettant de tester quotidiennement les qualités de la solution multifonction.

1 kit de départ contient 60ml de solution multifonction.





passt.

L'option pour lentilles rigides

→ Les avantages d'All-in-One RGP

All-in-One RGP est un produit de désinfection.

Pour tous ceux qui n'optent pas pour le système peroxyde et son effet exceptionnellement rapide, désinfection et neutralisation en 1 heure (voir page 6).

Vous voyez ici la solution multifonction pour des lentilles de contact rigides perméables aux gaz.

L'étui i-case avec votre logo → Page 14.





passt.

D'une manière

Soit des produits à l'unité ...

Appenzeller Kontaktlinsen ne vous offre pas seulement toutes les lentilles, mais aussi tout, pour que vos clients aient plaisir à porter leur lentilles et ceci aussi longtemps que possible.

→ Fidélisation de la clientèle, sécurité et confort

Les produits d'entretien constituent une gamme de produits d'appel pour fidéliser une clientèle : ils sont à renouveler chaque mois, vos clients sont donc conduits à revenir régulièrement.

Les porteurs de lentilles et utilisateurs des produits d'entretien et des accessoires d'Appenzeller Kontaktlinsen sont des clients :

- au sentiment de sécurité et de confort élevés
- éprouvant un haut degré de satisfaction

→ Quelle configuration souhaitez-vous pour vos clients ?

L'ordre est : nettoyer et rincer, désinfecter et conserver. Nous vous proposons des produits d'entretien assortis selon vos besoins et souhaits. Lots de produits emballés dans un film transparent facile à ouvrir sans outil.

→ Exemples de configuration

- 1x Nettoyant + 1x Saline + 1x Peroxyde + 1x Enzyme
- 1x Nettoyant + 1x Saline + 1x All-in-One soft
- 1x Nettoyant + 1x Saline + 1x All-in-One RGP

Bien entendu, toute autre configuration est possible, à votre convenance.

→ Notre service externe : à l'écoute de vos questions et vos demandes

Quelle configuration est conseillée pour vous et vos clients ?

- Combien cela coûte, si vous commandez une certaine quantité ?
- Quelles sont les conditions de livraison et de paiement ?

Il n'y a qu'une seule réponse à toutes ces questions : parlez-en avec nos commerciaux.



passt.

ou d'une autre :

... soit en lot – composé selon vos souhaits.

→ Tous les produits sont disponibles en lot de 2 ou 3

Appenzeller Kontaktlinsen Peroxyde



Appenzeller Kontaktlinsen All-in-One RGP



Appenzeller Kontaktlinsen All-in-One soft



→ Ou en lot de 2 ou de 3 avec notre nettoyant

Appenzeller Kontaktlinsen Nettoyant + Peroxyde



Appenzeller Kontaktlinsen Nettoyant + All-in-One RGP



Appenzeller Kontaktlinsen Nettoyant+ All-in-One soft



→ ...pour ne citer que quelques-unes des nombreuses combinaisons possibles



passt.

CONSERVER

Lentilles sclérales

→ Système peroxyde sans catalyseur

Grandes corbeilles pour les grandes lentilles souples et lentilles sclérales. Peut être utilisé avec l'Appenzeller Kontaktlinsen Peroxyde



Toutes les lentilles

→ Pincette bleue

Avec une pointe en silicone transparente. Livrée dans une boîte pour des raisons pratiques et hygiéniques.



→ Boîtier à lentilles

Idéal pour la salle d'adaptation. Ce boîtier transparent est robuste et hygiénique. Il convient également pour les grandes lentilles.



POSER ET RETIRER



passt.

Lentilles (mini-)sclérales

Lentilles rigides

→ Pour poser des lentilles sclérales
et mini-sclérales « Moritz »

Avec une lumière de fixation



→ Pour poser et retirer des lentilles
rigides

Ventouse classique avec trou



→ Pour poser des lentilles sclérales
« Max »

La pose des lentilles devient un jeu d'enfant

- Poser la lentille dans le creux
- Glisser cette aide à la pose comme une bague sur le bout du doigt
- Poser la lentille d'abord en bas et ensuite en haut

→ Pour retirer des lentilles
rigides

Ventouse classique sans trou





passt.

LES ÉTUIS i-CASE

Avec ou sans logo, selon votre choix

→ Chaque jour, vos clients
penseront à vous

Ils verront votre logo quotidiennement. Nous l'imprimons gratuitement sur le couvercle gauche de cet étui. Une seule condition : le minimum de commande est de 300 pièces.

1. 5 couleurs sont à disposition

- jauneRAL 1018
- orangeRAL 2009
- rougeRAL 3020
- vertRAL 6024
- bleuRAL 5005

2. 3 possibilités de design au choix

- Votre logo quantité minimale : 300 ex.
- Notre logo.....aucune quantité minimale
- Couvercle vierge.....aucune quantité minimale



...grandes fenêtres sur le monde.

appenzeller
kontaktlinsen®
passt.

i-NIGHT



L'orthokératologie au plus haut niveau
À porter la nuit pour voir le jour :
sans lunettes et sans lentilles.

Personnelle-KK
Excellent-KK



Lentilles de contact pour kératocône
Haute conicité, haute demande :
haute adaptation.

i-MAP



Pour l'adaptation des cornées irrégulières
Convient quand aucune autre
ne convient.

i-MATRIX



Sklerallinsen
Verletzte Hornhaut, Keratokonus oder
Keratoplastik? Passt trotzdem.

*pro*ASSIST



Assistance professionnelle en cas
de myopie évolutive
Des lentilles bien adaptées pour
ne pas avoir de verres épais.



passt.

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Hauptstrasse 22
CH-9042 Speicher AR
Téléphone +41 71 344 20 00

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Kemptener Strasse 8
D-88131 Lindau
Téléphone +49 69 332 962 31

Appenzeller Kontaktlinsen AG
Postfach 29
A-6973 Höchst
Téléphone +43 72 088 16 97

info@appenzeller-kontaktlinsen.ch www.appenzeller-kontaktlinsen.ch

10 Points

Ce qui plaide pour Appenzeller Kontaktlinsen

→ Succès d'adaptation

Nous nous efforçons de vous connaître et de vous comprendre, afin d'être sûrs que votre adaptation soit réussie aussi bien pour votre client que pour vous.

→ Technologie de pointe

La R&D est notre principal investissement pour que nos produits bénéficient des toutes dernières avancées technologiques.

→ Swiss made

Nous sommes très exigeants sur la qualité de fabrication de nos lentilles de contact. Afin qu'elles correspondent à vos attentes du « Swiss made ».

→ Reproductibilité

Nous portons une attention permanente au suivi de nos clients afin de leur fournir les mêmes lentilles lors des renouvellements.

→ A votre écoute

Notre Service Professionnel vous fournira une assistance compétente, afin de recevoir une réponse personnalisée à chacune de vos questions, et la lentille adéquate.

→ Travail sur mesure

Nous produisons chaque lentille de contact individuellement, pour vous. Cela signifie qu'elle correspond à 100% à vos spécifications.

→ Droit d'échange

Nous vous fournissons nos lentilles de contact avec ou sans droit d'échange. L'option droit d'échange vous permet de ne payer qu'une franchise si vous décidez de modifier votre commande, il vous donne la sécurité financière. La date du bon de livraison détermine la date de début de la période d'échange.

- Lentilles souples
 - Lentilles 3 mois *i-SOFT* : 1 mois
 - Lentilles semestrielles : 2 mois
 - Lentilles annuelles : 3 mois
- Lentilles rigides : 3 mois

→ Prix avantageux

Nous offrons des conditions de paiement particulièrement avantageuses. Afin d'en profiter prenez contact avec nous pour les termes et conditions.

→ Garantie

Nous prenons grand soin à produire nos lentilles. Alors vous pouvez compter sur nous pour vous garantir nos lentilles de contact.

- Lentilles 3 mois *i-Soft* : 1 mois
- Lentilles semestrielles : 2 mois
- Lentilles annuelles : 3 mois.

Une lentille cassée ? Renvoyez-la pendant la période de garantie et nous la remplaçons : à la commande suivante, nous vous accorderons une note de crédit. La date du bon de livraison détermine la date de début de la garantie.

→ Optique long terme

Nous aspirons à établir une relation commerciale qui se veut durable et surtout à long terme toujours plus partenariale.